

COVID-19  
新型コロナウイルス

# 抗原検査キット

(研究用)

「こんなときに」

会議前に

出張前に

日々の  
体調管理に



## 【ポイント】

『個人で簡単に検査！』

- ・ **約10分**で検査可能！※1
- ・ **精度は96.4%**！※2
- ・ **CEマーク取得済み**！※3

販売元：チャンスメーカー（株）

## 商品単価（税別）

1～9セット @ **4,200円**

50～59セット @ **2,500円**

100セット～ @ **2,200円**

※送料込み。  
（北海道、沖縄、離島は別途）

※注文単位により価格が異なります。  
記載の数量以外の場合はお問い合わせください。

※流動在庫です。  
納期は都度ご確認ください。

※1. 口内を清潔にした後、喉や鼻の奥の粘膜を綿棒の先全体がしっかりと湿る状態になるように採取したものを検査します。喉で採取する目安は、綿棒の先が口粘膜や舌に触れないように「口蓋扁桃」「咽頭後壁」※2の箇所で行うのが一般的と言われています。

鼻で採取する場合はインフルエンザの検査の際と同程度で、鼻の奥の壁に当たる程度です。


※2. 陽性検体：324個、陰性検体：481個を併せた総検体数：835個の実績です。

陽性一致率： $324/354 \times 100\% = 91.53\%$

陰性一致率： $481/481 \times 100\% = 100.0\%$

精度： $(324+481) / (354+481) \times 100\% = 96.41\%$

※3. CEマークとはEU加盟国への販売に際して、商品の安全、健康、環境および消費者保護の要件に準拠して製造していることを証明するものです。

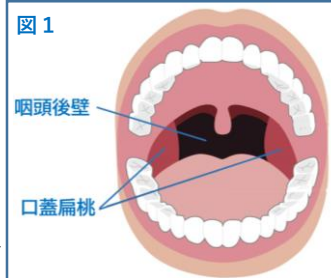

# 使用方法



使い方について、動画でもご紹介しております。

キャップを突き破る

5~10回

口や鼻の奥の粘液を綿棒で採取し、溶液の中に挿入して5~10回まわします。

綿棒を折る

綿棒のヘッド部分をチューブ内に残した状態で綿棒を折ります。残りの取手部分は取り出します。



## 判定結果の目安

※結果は15分以内にご確認ください。  
 ※被験者の体調、病歴、臨床症状等によって左右される場合があります。  
 ※検査結果の線は、紫がかった赤で表示されます。

例：陰性の場合


約10分後  
結果確認

2滴

検体を含んだ抽出液を検査デバイスの穴に2滴加えます。約10分後に検査結果を確認できます。  
 ※検査結果は赤線の表示後15分以内にご確認ください。

蓋を外す

付属のキャップで抽出チューブを閉じた後、抽出側の蓋を取り外します。

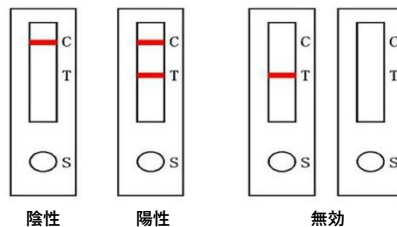

※無効が出た場合は日本物産までご連絡ください。

機能特性 (検体数835人)

感度(陽性一致率) ……91.5%  
 特異度(陰性一致率) ……100%  
 精度(全体一致率) ……96.4%



## 検査キットパウチ内容物

### ■内容物

- ① パウチ(この中に②~⑥が封入されています。)
- ② 説明書
- ③ 抽出液
- ④ 標本展開フィルターキャップ
- ⑤ 検体採取用滅菌綿棒
- ⑥ 検査デバイス

### ■仕様

方法：免疫クロマトグラフィー  
 認証：CE-IVD  
 検体：中咽頭スワブ  
 実行時間：10~15分  
 使用期限：製造日より18ヶ月  
 保存条件：2~30℃  
 製造国：中国製

### ■使用上の注意

- 本製品の使用は体外診断用医薬品ではなく研究用試薬になりますので新型コロナウイルスの診断確定に使用するものではありません。
- 新型コロナウイルス感染を疑う症状があると不安を感じている方に対して感染有無判定の参考として使用してください。  
 抗原テストの結果は、SARS-CoV-2感染の診断や治療の目的として使用しないでください。
- 本製品は既往感染や現症感染を区別できない抗体検査の不足を補い、新型コロナウイルス感染者に臨床診断の補助として使用します。臨床診断としては使用できません。

## Q&A

Q:使用期限はどれぐらいになりますか？

A:使用期限:製造日より18ヶ月となります。

Q:使用後のキットの処理方法はどうすればいいですか？

A:雑貨扱いのため一般廃棄物として処理をお願いします。(または)各自治体の廃棄区分に従って処理をお願いします。

Q:陽性反応などが出た場合どうすればよいでしょうか？

A:かかりつけの病院や地域の相談窓口にご連絡されることをお勧めしています。

<商品に関するお問い合わせ>

日本物産株式会社 マーケット開発本部

(担当：営業第一部・第二部・第三部)



0120-882-808

受付時間9:00~17:00 (平日のみ)

